

# 入浴補助用具

## Otter Bath Chair オッターバスチェアー

### 取扱説明書



このたびは オッターバスチェアー をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。  
この取扱説明書はなくさないよう保管してください。



目次	ページ
1. 安全に使用するためのご注意	1
2. 各部名称	2
3. 仕様	3
4. 各部調整方法	4
-1. 角度調整	4
-2. ベルトの取り付け	4
-3. オプション	5
-4. メンテナンス	5
5. 保守と点検	6
6. 廃棄方法	6
7. 保証書	7

## 安全に使用するためのご注意

- ご使用の前に、この取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。
- 誤った使用をされますと事故や破損につながる恐れがあります。
- 各部の調節はこの取扱説明書に従って行ってください。
- この取扱説明書には、安全にお使いいただくために表示をしています。その表示を無視して誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



### 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています



### 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています



### 警告


- お子様を乗せたままバスタチェアを離れないでください。
- 傾斜のある場所や不安定な場所での使用はしないでください。
- 他の人に貸出ししたり本人以外での使用はしないでください。
- 各部調節は説明書に従って行ってください。
- 二人乗りや踏み台等別の用途で使用しないでください。
- ベルト類は必要以上に締めすぎないでください。
- お子様を乗せたままバスタチェアを持ち上げないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 本製品を調整し、仕様変更する際は、ご購入された販売店にご相談ください。
- 介助者は医療従事者のアドバイスのもと、最適な使用方法を検討したうえでご使用ください。
- フレームの異常、ベルト類の破損等、不具合のある状態での使用はしないでください。
- 故障や異常を感じる箇所がありましたら直ちに使用を中止し販売店へご連絡ください。



### 注意

- 使用の際はベルトで体を支えてください。
- 体に合わない状態での使用はしないでください。
- フレームやシートは常にきれいにしておいてください。
- 小さなお子様が周囲にいる場合、誤って指や手足を挟む等してケガをする恐れがあります。
- 角度変更時はフレームが連動し動きますので指等を挟まないよう注意し操作してください。
- 各部のガタやネジの緩みやタイヤの擦り減り等、定期的に点検・確認をしてください。

## 各部名称

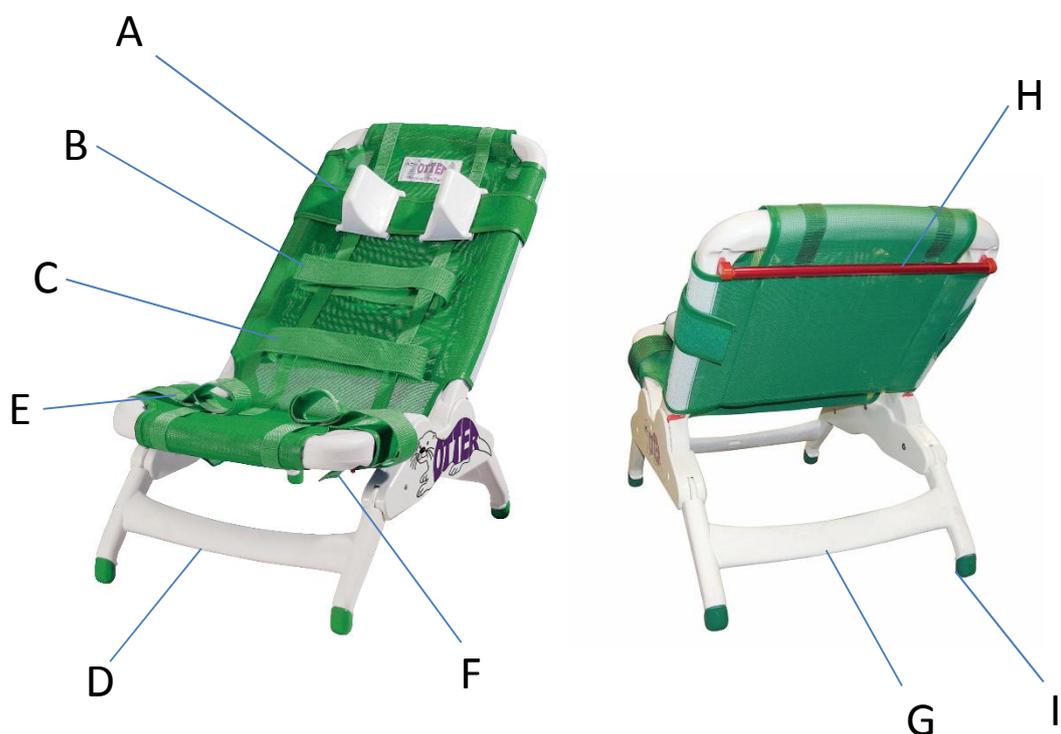

A - スライドヘッドサポート (標準)

B - 体幹ベルト (標準)

C - 体幹ベルト (オプション)

D - 前脚角度調節バー

E - 足部ベルト (標準)

F - 座角度調節バー(赤)

G - 後脚角度調節バー


H - 背角度調節バー(赤)

I - 脚先端キャップ

## 仕様


	S	M	L
座幅	34cm	34cm	34cm
座奥(A)	33cm	33cm	42cm
背高(B)	45cm	63cm	80cm
全幅(C)	42cm	42cm	42cm
全長(D)	88cm	105cm	124cm
前座高(E)	14/27 cm	14/27 cm	14/27 cm
重量	5kg	5.5kg	6.5kg
耐荷重	25kg	50kg	65kg
適応身長	~90cm	80~120cm	120~170cm

\* 座幅はシートパイプの内内のサイズです。

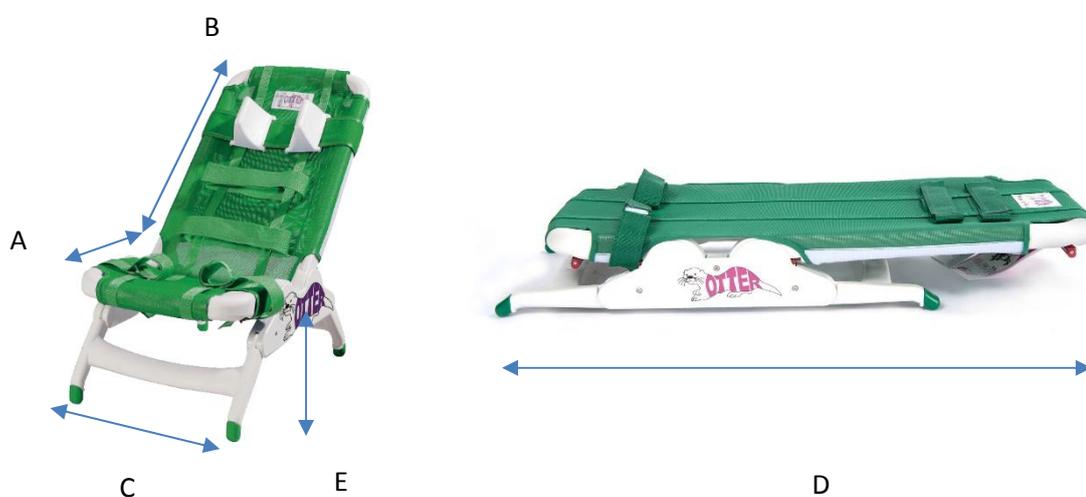

## 各部調整方法

### 【角度調整】

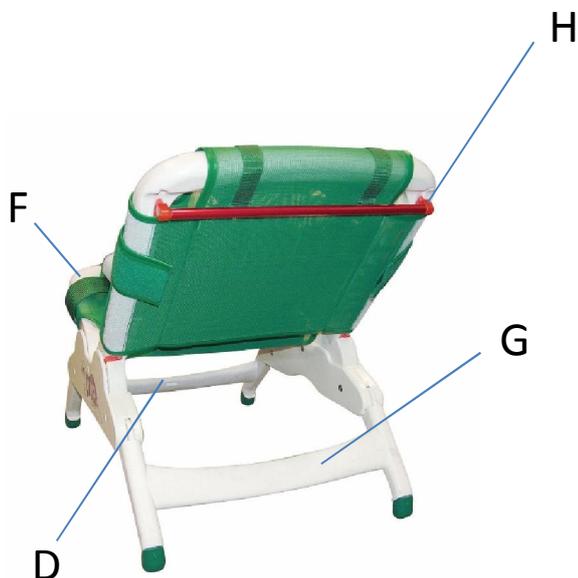

- 1) Hのハンドルを引っ張り上げながら背もたれの角度を調整してください。
- 2) ハンドルを離すと90～180° 5段階の位置で固定されます。
- 3) レッグサポートはFのハンドルを引っ張りながら角度の調整をしてください。
- 4) ハンドルを離すと0～90° 5段階の位置で固定されます。
- 5) 前後脚DとGにあるフレームを引っ張りながら前後脚の角度を調整できます。



### 注意

指を挟まないよう  
ご注意ください。

### 【ベルトの取り付け】



- 1) 付属のヘッドサポートと胸ベルト、骨盤ベルト、足部ベルトは、オットー本体に巻き付け固定してください。
- 2) 高さの位置調節はストラップの上下位置にて行います。



## 【オプション】



タブスタンド



シャワースタンド

- 1) シャワーチェアの4つの脚を○印の赤いレバー部分に差し込んで下さい。
- 2) カチッとロックされる音がなり、抜けない事を確認してください。
- 3) 外す時は赤いレバーを開き、ロックを解除してから引き抜きます。
- 4) タブスタンドを使用した時の前座高は38・53cm、シャワースタンドは76cmになります。

### 【重量】


タブスタンド : 4kg

シャワースタンド : 7kg(キャスター含む)



## 【メンテナンス】

- 1) シート素材はポリエステルで出来ており、抗菌性、速乾性のある素材です。
- 2) シートは洗濯が可能ですが、洗濯洗剤等を使用し漂白剤等は使用しないでください。
- 3) お洗濯時は38℃以上の温水は使用しないでください。
- 4) 乾燥機等は使用せず自然乾燥させてください。

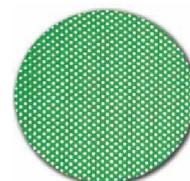

## 保守と点検

- 長くご使用いただくためには、保守、点検、整備をこまめに行ってください。
- 1. ボルトやネジが緩んでいる場合は、そのまま使用せず締め直してください。
- 2. ボルトやネジが無くなっている場合は、そのまま使用しないで販売店にご連絡ください。
- 3. 折りたたみに不具合が出て来た場合、ベルトを挟んでいたり、フレームの接合部分に不具合がある場合がありますので、そのまま使用せず、必ず点検し問題があれば販売店にご連絡ください。
- 4. フレームやシートは常にきれいな状態でご使用ください。
- 5. その他、不調にお気づきの時も販売店へご連絡ください。

## 廃棄方法

- 本製品 及び 部品の廃棄については 市町村の条例などの指示に従って処分して下さい。

## 保証書

機種 ; Otter bath chair

シリアルNo;

お客様

ご氏名

ご住所

ご購入年月日

1. 本製品の保証期間は、ご購入から1年です。(消耗品は保証の対象にはなりません)
2. 本保証書規定に基づく修理を希望の際には、下記のお買い上げ店へ保証書を添えてお申し出下さい。尚 お買い上げ店にご持参頂くに際しての諸費用は お客様にご負担お願い致します。
3. 次の場合は 上記の保証期間内でも 保証の対象となりません。
  - 1. 使用上の誤り(取扱説明書以外の誤操作)により生じた故障。
  - 2. 当社の指定する修理取扱所以外で行われた修理による故障。
  - 3. 改造 又は 承認されていない部品の使用による破損や故障。
  - 4. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変 及び 公害・ガス害(硫化ガス等)による故障。
  - 5. 浸水・落下・とげ・砂等により生じた故障。
  - 6. 車両・船舶・航空機 等に搭載された場合に生ずる故障。
  - 7. 保管上の不備や手入れ不備 等による故障。
  - 8. 販売店名・ご購入年月日・シリアルNo<sup>o</sup>等の記入なき場合 又は 記載事項を訂正された場合。
4. 本保証書は紛失されましても再発行致しませんので 大切に保管して下さい。

販売店・住所・電話番号

MEMO

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for writing a memo. The box is vertically oriented and occupies most of the page below the header.

総販売元 **SHOWA** 昭和貿易株式会社  
power your mission

東京 〒101-0032  
東京都千代田区岩本町1丁目10番5号6階  
TEL (03)5822-1385(代) FAX (03)5822-1396

大阪 〒550-0002  
大阪市西区江戸堀1丁目18番27号  
TEL (06)6441-5612(代) FAX (06)6444-6006  
(180215)

