

R82[®]

歩行器

Crocodile 3

－ クロコダイル －

取扱説明書



この度は R82社製 歩行器クロコダイルをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本製品を正しくお使いいただきますよう
お願いいたします。

この取扱説明書はなくさないよう保管してください。

SHOWA 昭和貿易株式会社
power your mission


目 次

1. 安全に使用する為のご注意	P3
2. 仕様	P3
3. 各部、オプションの名称	
-1. 本体各部	P4
-2. オプションパーツ	P5
4. 各部の調整方法	
-1. 組み立て方	P6
-2. トップフレームの調節	P7
-3. ハンドルの調節	P8
-4. 逆転防止ストッパーの使用	P9
-5. 抵抗付きキャスターの使用	P10
-6. 直進走行スタビライザーの使用	P11
-7. スイングアウェイアンチチッパーの使用	P12
-8. シートの使用	P13
-9. クロスバーの使用	P14
-10. バックサポートの使用	P15
-11. サイドサポート付きバックサポートの使用	P16
-12. アジャスタブルバックサポートの使用	P17
-13. ヒップサポートの使用	P18
-14. アームホルダーの使用	P19
-15. ハンドルノブの使用	P20
-16. 折りたたみ方	P21
5. メンテナンス・廃棄方法・警告	P22
6. 保証書	P23

1. 安全に使用する為のご注意

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。誤った使用をされますと事故や破損につながる恐れがあります。
- 各部の調節はこの取扱説明書に従って行ってください。
- クロコダイルはヨーロッパの安全基準であるCEマークを取得しています。なお、フィッティング時や修理される際はR82社の純正パーツをご使用ください。
- 事故や怪我の恐れがありますので、ご使用中は大人の方が使用者から目を離さないようにしてください。
- クロコダイルは1人で使用する構造になっています。2人以上でのご使用はなさないでください。
- ご使用前に、必ずすべてのオプションが正しい位置に固定されているか・ボルトやナットの緩みがないか確認してください。
- フレームは常にきれいにしておいてください。(塩素系の洗剤は使用しないでください。)

2. 仕様

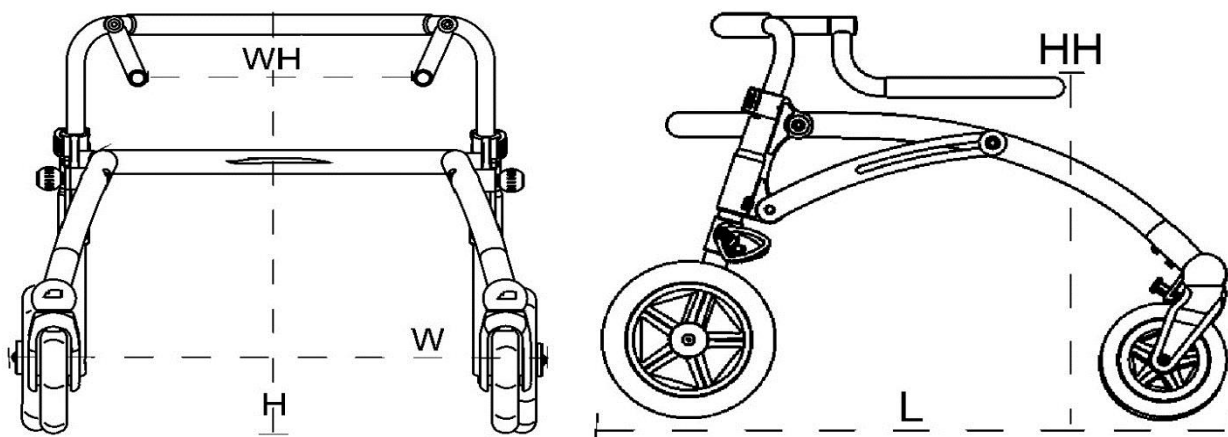

床からトップフレームまでの長さ(H) (最小時)	76cm
最大全幅(W)	69cm
全長(L)	87cm
ハンドル幅(WH)	35-69cm
床からハンドルまでの高さ(HH) (最小時)	70-100cm
折り畳み時の長さ	100cm
折り畳み時の高さ	29cm
最大適用身長	180cm
耐荷重	80kg
重量	12kg

3. 各部、オプションの名称

ー1. 本体各部



— nothing compares! —

ー2. オプションパーツ



アンチチッパー



シート



クロスバー



バックサポート



サイドサポート付
バックサポート



アジャスタブル
バックサポート



ヒップサポート




アームホルダー



ハンドルノブ

4. 各部の調整方法

ー1. 組み立て方

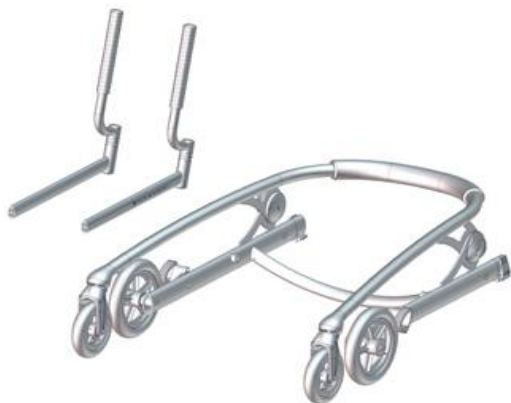

本体 標準仕様

- ① 折りたたまれた本体フレームをゆっくり引き延ばしてください。



- ② 本体フレームの折りたたみ用ロックをかけてください。

- ③ ハンドルを本体フレームに差し込み、トップフレーム用ロックをかけてください。



ロック機構や本体フレームに指や手をはさまないよう注意してください。

トップフレームの差し込み口は安全のためきつくなっておりません。六角ボルトを緩めたり、潤滑剤等をご使用ください。

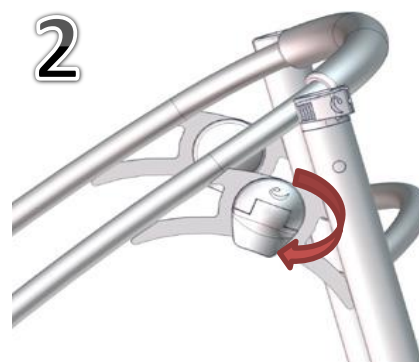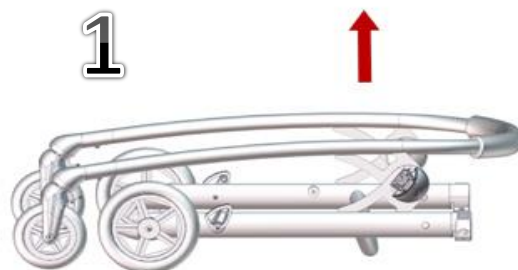

ー2. トップフレームの調節

① トップフレーム用ロック機構を開いてください。



② ハンドル高を上下に調整してください。



③ 再びトップフレーム用ロック機構を締めてください。



トップフレームを最高位置にするときは、
注意してください。

トップフレーム用ロック機構は頻繁に締め
直してください。

ー3. ハンドルの調節

① 六角レンチを使って、六角ボルトを締めてください。

② ハンドルを適切な位置に調整してください。


③ 六角ボルトを締めてください。



クロコダイルを再度使用する前に、六角ボルトが緩んでないか確認し、使用中も注意してください。


ー4. 逆転防止ストッパーの使用

- ① 機能を有効にする方法
プッシュピン(A)を押しながら、バックストッパー(B)をおろしてください。
逆転防止ストッパーが有効になります。
- ② プッシュピン(A)を押しながら、バックストッパー(B)をあげて下さい。
逆転防止ストッパーが無効になります。

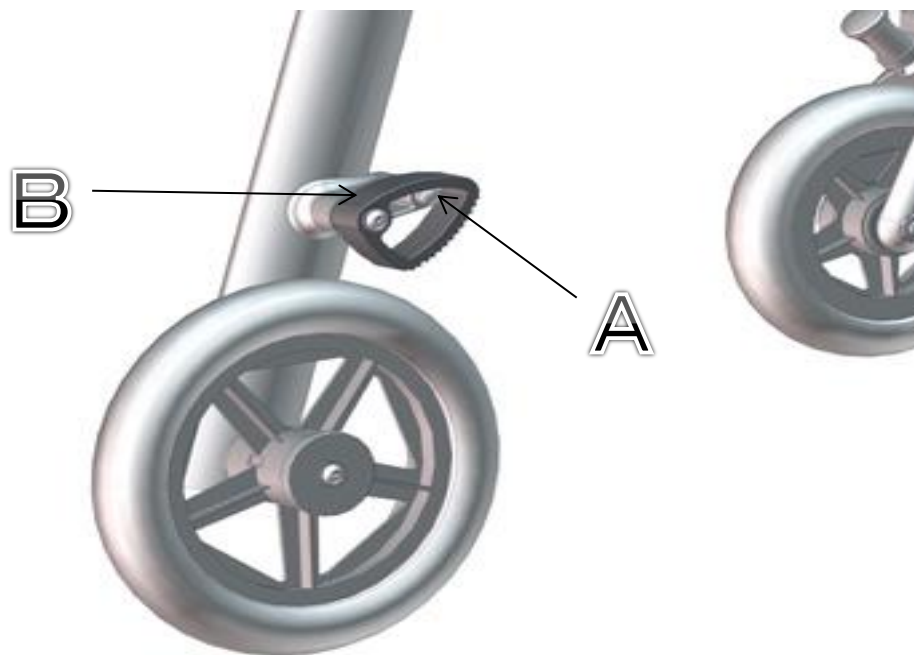


ー5. 抵抗付きキャスターの使用

- ① キャスターの抵抗をあげる方法
六角ボルト(A)を緩めてください。
ノブを右に回していくと抵抗があがっていきます。
六角ボルト(A)を締めてください。

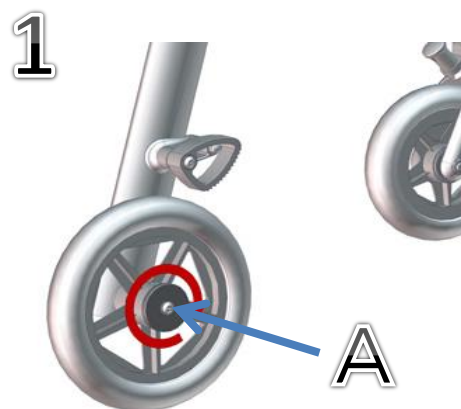

- ② キャスターの抵抗をさげる方法
六角ボルト(A)を緩めてください。
ノブを左に回していくと抵抗がさがっていきます。
六角ボルト(A)を締めてください。

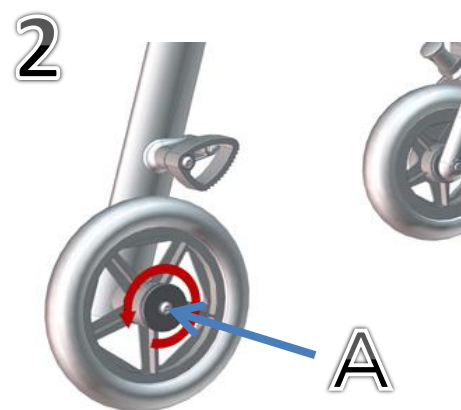

お子様の歩行速度が速すぎたり、遅すぎたりしないよう、抵抗付きキャスターでご調整ください。

ー6. 直進走行スタビライザーの使用


通常、前輪キャスターは自在輪ですが、直進走行スタビライザーによって直進のみに切り替えることが可能です。

① 直進のみに切り替える方法

直進走行スタビライザー(A)を引っ張り、(B)のように左右どちらかに回してください。定位置でスタビライザーを放すと、(C)のように固定されます。直進のみに切り替わります。

② 自在輪に切り替える方法

直進走行スタビライザー(A)を引っ張り、(B)のように左右どちらかに回してください。定位置以外でスタビライザーを放すと、(C)のように解除されます。自在輪に切り替わります。

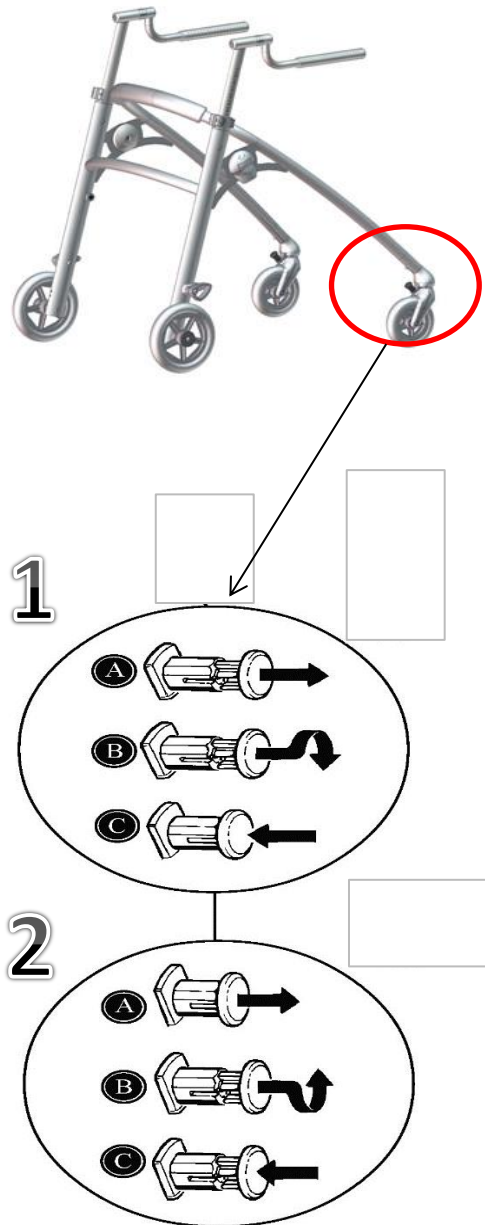

ー7. スイングアウェイアンチチッパーの使用

スイングアウェイアンチチッパーを使用することにより、後方への転倒を防ぐことが可能です。

アンチチッパーを有効にする方法
プッシュピンからカチッと音がするまで、
アンチチッパーを下方に回転させてください。
アンチチッパーが有効になります。

アンチチッパーを無効にする方法
プッシュピンを押しながら、
アンチチッパーを上方に回転させてください。
アンチチッパーが無効になります。


- ① 取り付け方
本体フレームに六角ボルトを通し、
アンチチッパーを締めこんでください。
- ② 注意点
プッシュピンポイント(A)がしずみこむことが重要です。アンチチッパーを締める前に
スプリングが外のプッシュピンを動かしているか確認してください。



1



2

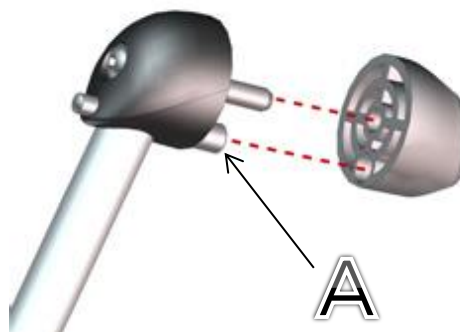

－8. シートの使用

シートを取り付ける方法

- ① シートと本体を合わせ、ネジ穴の位置に調整してください。



- ② 六角ボルトをシートのネジ穴に通し、本体フレームに取り付けてください。



六角ボルトがしっかりと締まっているかを確認してください。




ー9. クロスバーの使用

クロコダイルサイズ3でバックサポート等を使用する際は、クロスバーを取り付ける必要があります。

- ① トップフレームを抜き、クロスバーを差し込んでください。
- ② クロスバーのついている状態でトップフレームを本体フレームに差し込んで下さい。
- ③ 高さを調整し、クロスバーのロックと本体フレームのロックをかけてください。



クロスバーのロックと本体フレームのロックがしっかりとかかっていることを確認してください。

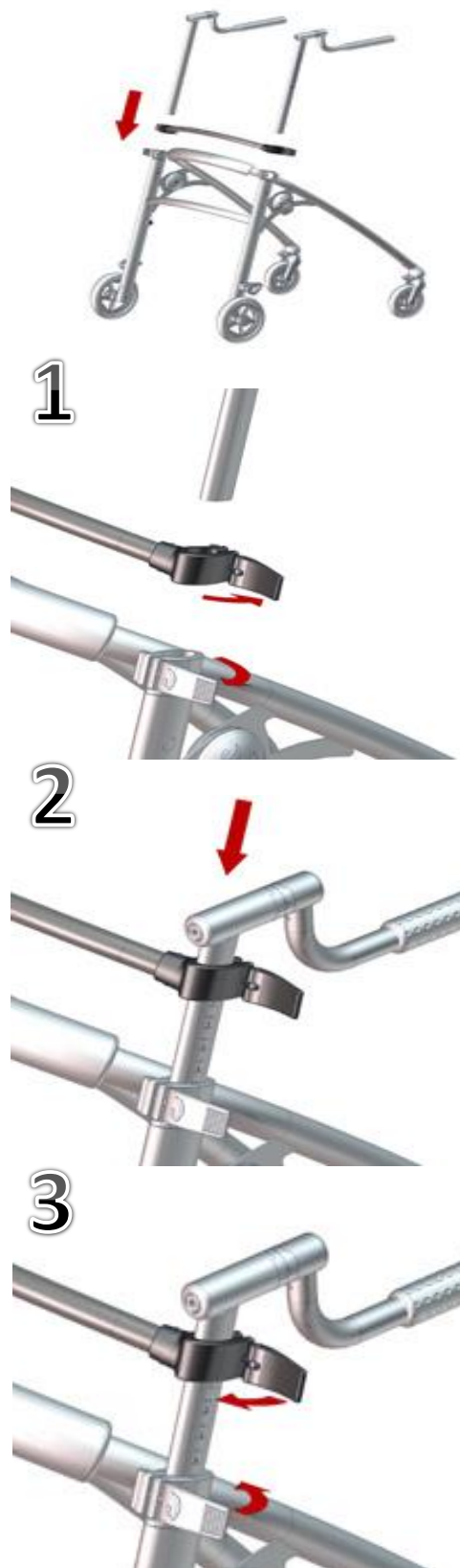


－10. バックサポートの使用

クロスバーにバックサポートを取り付けます。



- ① クロスバーをはさみこむように、バックサポートとクランプを合わせてください。

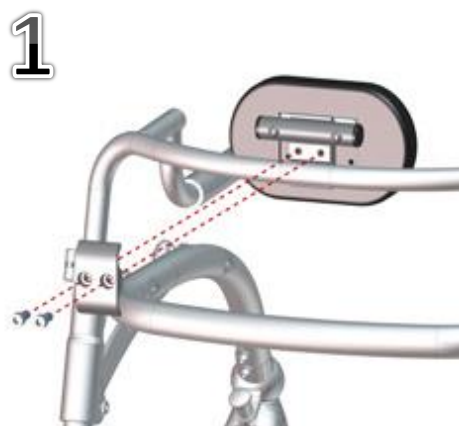

- ② バックサポートの左右位置を調整し、六角ボルトを締めてください。




六角ボルトがしっかりと締まっているか、確認してください。


－11. サイドサポート付きバックサポートの使用

クロスバーにサイドサポート付きバックサポートを取り付けます。

- ① クロスバーをはさみこむように、サイドサポート付きバックサポートとクランプを合わせてください。

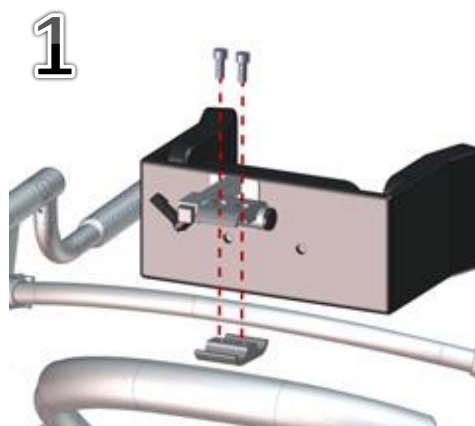

- ② サイドサポート付きバックサポートの左右位置を調整し、六角ボルトを締めてください。

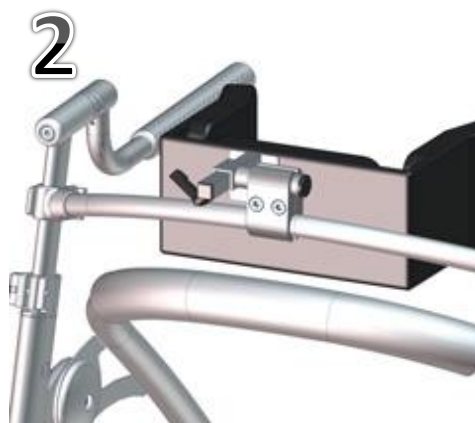


六角ボルトがしっかりと締まっているか、確認してください。

－12. アジャスタブルバックサポートの使用


クロスバーにアジャスタブルバックサポートを取り付けます。



- ① クロスバーをはさみこむように、アジャスタブルバックサポートとクランプを合わせてください。

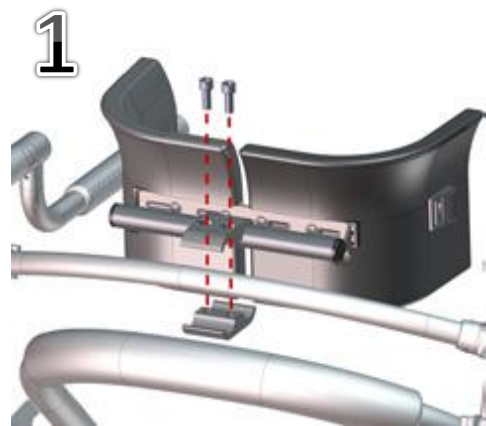

- ② アジャスタブルバックサポートの左右位置を調整し、六角ボルトを締めてください。

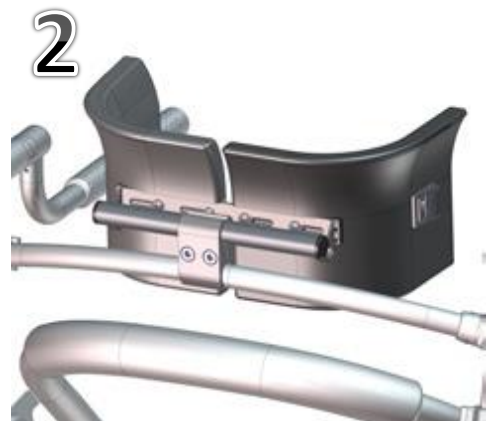

六角ボルトがしっかりと締まっているか、確認してください。

－13. ヒップサポートの使用

ハンドルにヒップサポートを取り付けます。



- ① ハンドルをはさみこむように、ヒップサポートとクランプを合わせてください。



- ② ヒップサポートの左右位置、高さを調整し、六角ボルトを締めてください。



六角ボルトがしっかりと締まっているか、確認してください。

－14. アームホルダーの使用

トップフレームにアームホルダーを取り付けます。

① ハンドルを六角レンチで取り外してください。

② 六角レンチでアームホルダーの前後、角度を調整したのち、トップフレームに合わせてください。

③ 六角ボルトでトップフレームとアームホルダーを連結し、六角レンチで締めてください。



アームホルダーの調節ボルトにゆるみがないか、こまめにチェックしてください。



1



2



3



ー15. ハンドルノブの使用

ハンドルの先端にノブを取り付けます。

- ① ハンドルの先端についているキャップを外してください。



- ② ノブをハンドルの先端に合わせ、六角ボルトを締めてください。




六角ボルトがしっかりと締まっているか、確認してください。

－16. 折りたたみ方

- ① トップフレーム用ロック機構を解除してください。
- ② 本体フレームからトップフレームを引き抜いてください。
- ③ 本体フレーム用ロック機構を解除してください。
- ④ ゆっくりと地面に対して垂直に押し、本体を折りたたんでください。



ロック機構や本体フレームに指や手をはさまないよう注意してください。

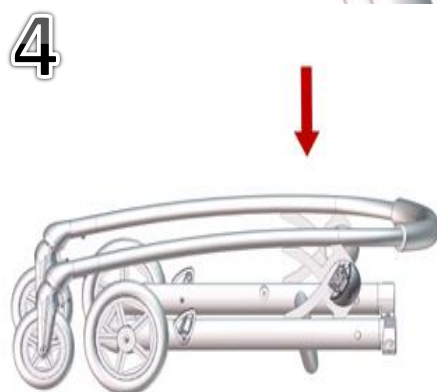

5. メンテナンス・廃棄・警告

ー1. メンテナンス

長くご使用いただくには、保守、点検、整備をこまめに行ってください。

- ・本体やパーツの可動部分に違和感がある場合、不具合、故障の可能性があるので、必ず点検し、問題があれば販売店にご連絡ください。
- ・ボルトやナット等が緩んでいないか、定期的を確認してください。
- ・ボルトやナット等がとれてなくなった場合は、そのまま使用しないで販売店にご連絡ください。
- ・フレームやパーツは常にきれいにしておいてください。

その他不調にお気づきの際は、販売店にご連絡ください。

ー2. 廃棄

本製品の廃棄につきましては、市区町村の条例などの指示に従って処分をしてください。

ー3. 警告

- ・子供さんを乗せたまま離れないでください。
- ・ベルト類は必要以上に締めすぎないでください。
- ・乗り降りの際は、必ずブレーキをかけておいてください。
- ・本製品を使用する前に毎回必ず点検を行ってください。
- ・故障や異常を感じる箇所がありましたら、直ちに使用を中止し販売店にご連絡ください。

6. 保証書

保証書〔お客様控え〕

品名 CROCODILE(クロコダイル)

フリガナ

ご住所

フリガナ

ご氏名

ご購入年月日 年 月 日

1. 本製品が取扱説明書の注意書きに従って、正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、ご購入から満一年間無料修理いたします。
2. 本保証規定に基づく修理をご希望の際には、下記のお買い上げ店へ保証書を添えてお申し出ください。
尚、お買い上げ店にお持ちいただく際の諸費用はお客様にご負担願います。
3. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象となりません。
 - ① 使用上の誤り(説明書以外の誤操作)により生じた故障。
 - ② 当社の指定する修理取扱所以外で行われた修理による故障。
 - ③ 消耗品(車輪の摩耗や損傷)
 - ④ 火災・天災・地変等により生じた故障。
 - ⑤ 浸水・落下・とげ・砂等により生じた故障。
 - ⑥ 保管上の不備や手入れの不備等による故障。
 - ⑦ 販売店名・ご購入年月日等の記入がない場合、または記載事項を改ざんされた場合。

販売店名・住所

SHOWA 昭和貿易株式会社
power your mission

東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1丁目10番5号 6F
ヘルスケア営業部

TEL 03-5822-1385 FAX 03-5822-1396

大阪 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1丁目18番27号 2F
ヘルスケア営業部

TEL 06-6441-5612 FAX 06-6444-6006

#180214-R